

Важная информация по использованию помп Акку-Чек®

Правильная замена картриджа



1 Снимите с картриджа защитный колпачок. (Не прикасайтесь к кончику картриджа.)



2 Надвиньте адаптер на кончик картриджа и протолкните до упора.




3 Тщательно подготовьте новый инфузионный набор Акку-Чек в соответствии с прилагаемыми к нему инструкциями.




4 Придерживая адаптер, другой рукой подсоедините люэровский наконечник-соединитель ввинчивающимися движениями по часовой стрелке. Не затягивайте слишком сильно.




5 При необходимости удалите картридж. Вывинчивайте осторожно. Не вытягивайте картридж, пока он не будет полностью вывинчен.

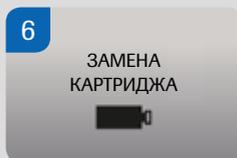


6 Нажмите «меню» для перехода к экрану ЗАМЕНА КАРТРИДЖА. Нажмите «✓» для подтверждения выбора.

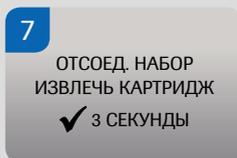

7 Убедитесь, что инфузионный набор отсоединен и картридж вынут из помпы. Нажмите и удерживайте клавишу «✓» в течение 3 секунд, пока не прозвучит мелодия.

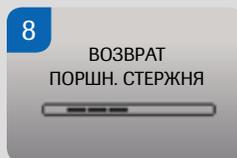

8 Придерживая адаптер, другой рукой подсоедините люэровский наконечник-соединитель ввинчивающимися движениями по часовой стрелке. Не затягивайте слишком сильно.

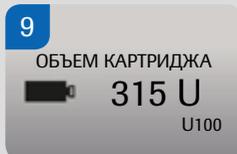

9 Когда поршневый стержень будет полностью убран, на дисплее отобразится экран ОБЪЕМ КАРТРИДЖА с указанием максимально допустимого объема – 315 U.



10 Удерживайте помпу в вертикальном положении. Возьмите новый заполненный картридж так, чтобы подсоединенный адаптер и инфузионный набор смотрели вверх. Поднесите картридж близко к отсеку для картриджа и держите его параллельно отсеку.



11 Убедитесь, что верхний край резьбовой части адаптера находится на одном уровне с верхней частью отсека для картриджа.



12 Нажимайте ▲ или ▼ чтобы передвинуть поршневый стержень таким образом, чтобы концевая пластина стержня находилась на одном уровне с нижней частью поршня картриджа.

АККУ-ЧЕК® Комбо



Удерживайте помпу в вертикальном положении (адаптер должен быть направлен вниз). Вставьте картридж в отсек для картриджа.



Поворачивайте (не толкайте) адаптер по часовой стрелке, пока он не войдет в отсек.




Картридж правильно вставлен в отсек, если концевая пластина поршневого стержня прилегает к поршню картриджа.




Если концевая пластина стержня не выровнена с поршнем картриджа, выньте картридж из отсека и повторите шаги 10–14.



Убедитесь, что люэровский наконечник-соединитель инфузионного набора продолжает оставаться правильно подсоединенным к адаптеру. Рукой затяните инфузионный набор по часовой стрелке, пока он не будет плотно прилегать к адаптеру.

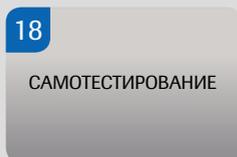

Если картридж установлен правильно, нажмите «Меню». Помпа начнет самотестирование.

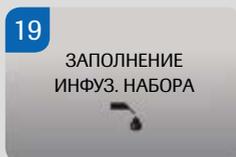

По окончании процесса самотестирования на дисплей будет выведен экран ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФУЗ. НАБОРА.

Неправильное использование может причинить вред Вашей инсулиновой помпе



Не устанавливайте картридж в инсулиновую помпу без подсоединенного к нему инфузионного набора. Это может привести к попаданию инсулина в отсек для картриджа. Попадание инсулина в отсеки помпы может потенциально со временем влиять на работу штока поршня инсулиновой помпы и блокировать работу мотора.



Не держите помпу в вертикальном положении адаптером вверх во время установки картриджа. Попадание инсулина в отсеки помпы может потенциально со временем влиять на работу штока поршня инсулиновой помпы и блокировать работу мотора. В данных случаях на дисплее помпы появится сообщение об ошибке E6 или E10 или помпа может остановить работу

Используйте свои возможности.

Информационный центр: 8-800-200-88-99
(звонок бесплатный для всех регионов России)

Адрес в интернете: www.accu-check.ru

Акку-Чек, Акку-Чек Комбо, Акку-Чек Спирит Комбо являются товарными знаками Рош