

СТЕРИЛЬНЫЙ ЛАНЦЕТ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(RU) Стерильный ланцет одноразового использования для забора капиллярной крови из пальца

Компоненты ланцета одноразового использования

(см. иллюстрацию 1)

1. Стерильный колпачок (1)
2. Футляр (2)
3. Кнопка "пуск" (3)

Особый срез и малый диаметр иглы (Ø 0,36 мм, 28 G) гарантируют **почти безболезненный забор** крови Вашему пациенту.

Стерильный колпачок (1) обеспечивает стерильность иглы.

Ланцет имеет **предохранительный механизм**, который автоматически втягивает иглу в футляр (2) после забора крови. Он помогает избежать случайного прокалывания пальца и перекрестного загрязнения.


Подготовка к забору крови

Рекомендуем брать капиллярную кровь с боковой стороны кончика пальца, поскольку в этом месте прокалывания отмечаются наименьшие болевые ощущения. Можно использовать любой палец.

Руки пациента должны быть вымыты теплой водой с мылом, а затем тщательно вытерты насухо. Это помогает снизить риск занесения инфекции и/или загрязнения в месте прокалывания, а также стимулирует кровоток. В случае использования смоченных спиртом салфеток палец перед продолжением процедуры также должен быть полностью сухим.

Забор крови

- Поверните стерильный колпачок (1) на четверть оборота вперед и назад или наоборот (а). Снимите колпачок (b) (см. иллюстрацию 2).

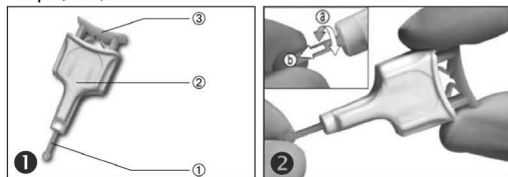


! Не используйте ланцет, если стерильный колпачок ранее снимался. Стерильность иглы может быть нарушена.

- Держите ланцет между указательным, средним и большим пальцами (см. иллюстрацию 3)
- Крепко прижмите ланцет к выбранному месту прокалывания.
- При помощи большого пальца нажмите кнопку "пуск" (3) до упора (см. иллюстрацию 4).
- Подождите, пока из места прокола не появится капля крови.

- Осторожно массируйте палец в направлении кончика пальца, способствуя формированию капли крови.

! Всегда утилизируйте использованные ланцеты в соответствии с принятым в Вашем учреждении порядком уничтожения.

! Для некоторых диагностических процедур кончик пальца не должен интенсивно массироваться или сильно сжиматься, поскольку такие действия могут привести к получению неправильных результатов.

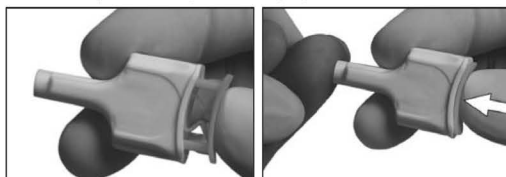

Патенты

EP 0 582 226 и другие патентные права лицензированы HTL-Strefa S.A.

	Обратитесь к Руководству Пользователя
	Только для одноразового использования
	Использовать до
	Стерилизовано облучением
	Изготовитель
REF	Номер по каталогу
LOT	Код партии
	Этот продукт отвечает требованиям Европейской директивы 93/42/ЕЕС по медицинскому оборудованию.

Официальный импортер в Украине:

ООО «Диалог Диагностика»

Украина, Киев, 03680, ул. Семьи Сосниных, 3, офис 417

Телефон горячей линии 0 800 500 311

Акку-Чек и Акку-Чек Сейф-Т-Про Уно являются торговыми марками компании

Рош Диагностикс ГмбХ,
68298 Маннхайм, Германия, www.accu-check.com

